

Détartrine Z

Pasta per detartraggio al zirconio granulare



Composizione

100 g contengono :

Silice 43,44 g

Silicato di Zirconio granulare 13,50 g

Eccipiente aromatizzato q.b.

Proprietà

DÉTARTRINE Z si presenta sotto forma di una pasta rosa, di sapore gradevolissimo.

DÉTARTRINE Z è dotata di azione abrasiva le cui caratteristiche, particolarmente interessanti in odontoiatria, sono dovute alla struttura particolare dei granuli di Zirconio in essa contenuti. Visti al microscopio, questi granuli si presentano a forma di piccolissime scaglie piatte le cui faccette sono separate da un filo tagliente di elevata durezza. Quando questo tipo di polvere è sfregata su una superficie rugosa il filo tagliente di cui è dotato ogni granulo ne asporta le asperità.

Questa proprietà dei granuli di Zirconio consentono a DÉTARTRINE Z di eliminare il tartaro dentale senza intaccare lo smalto.

Le essenze incorporate in DÉTARTRINE Z producono una sensazione di freschezza, molto apprezzata dai pazienti.

Oltre a questa proprietà, le essenze hanno anche un lieve potere balsamico. Per cui l'irritazione che l'azione meccanica del detartraggio potrebbe provocare su alcune gengive sensibili, viene completamente calmata.

Indicazioni

- Rifinitura del detartraggio.
- Eliminazione di colorazioni dovute al tabacco o agli alimenti.
- Lucidatura minuta delle otturazioni.

Modo d'uso

Prelevare, con una spatola, la quantità necessaria di DÉTARTRINE Z e cospargere il cono rotativo a spazzola.

Presentazione

Vasetto da 45 g.

Rappresentante per la vendita in Italia :

GIOVANNI OGNA & FIGLI s.p.a.

Via Figini n.41 - 20053 MUGGIO (Mi)

Prodotto dalla ditta :

SEPTODONT- 58, rue du Pont de Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex, France.
Tél.: 01 49 76 70 00

