




# Racegel

Piena potenza per la gestione dei tessuti molli



RACEGEL È L'UNICO GEL TERMOGELIFICABILE CHE CREA UN AMBIENTE PULITO ED ASCIUTTO PER OGNI PROCEDURA CHE NECESSITA UNA GESTIONE DEI TESSUTI GENGIVALI.

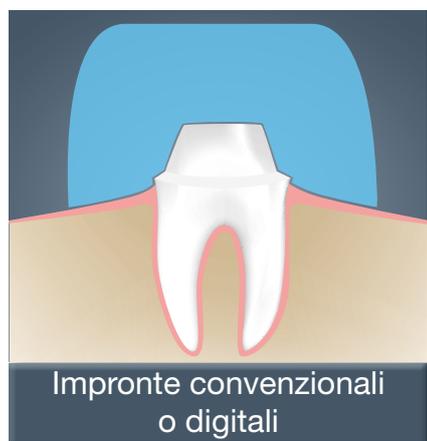

## Effetto Astringente Integrato

- **Contrazione dei tessuti molli** grazie al 25% di cloruro di alluminio
- **Ottimo controllo** del sanguinamento senza pigmentazione gengivale
- **Facile accesso** ai margini subgengivali
- **Non sono necessarie** specifiche soluzioni emostatiche
- Creazione di un ambiente **pulito ed asciutto**



Prima dell'applicazione di Racegel




Dopo l'applicazione di Racegel: gengiva pulita ed asciutta

## Preparazione Gengivale Atraumatica

- **Dal liquido al gel:** viscosità termogelificabile unica:
  - A temperatura ambiente (20°C), Racegel è liquido nella siringa
  - La viscosità di Racegel aumenta con la temperatura
  - Con la temperatura dei tessuti orali (35°C) la viscosità di Racegel aumenta per diventare un gel

### Evoluzione della viscosità di Racegel con la temperatura

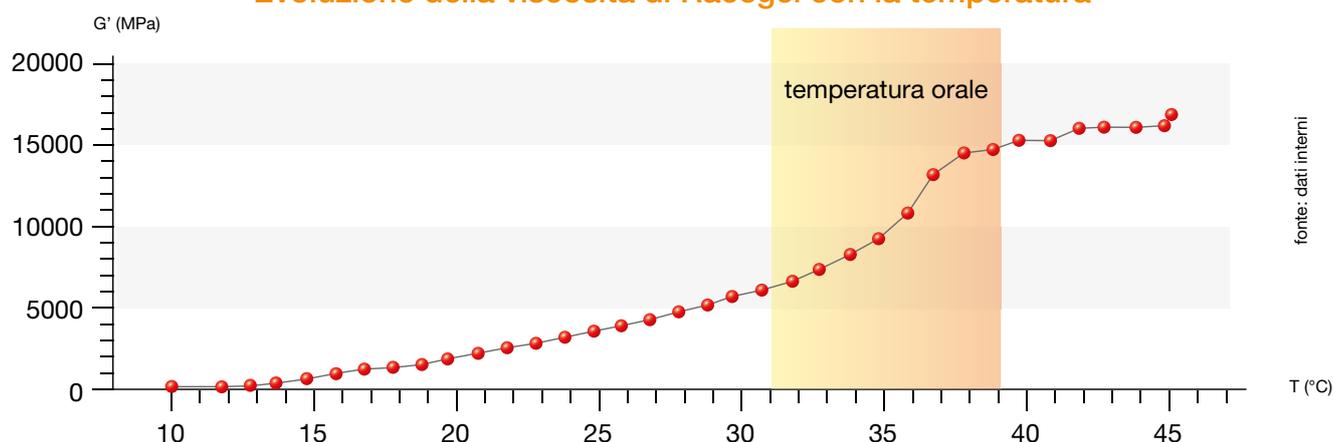

## Posizionamento Facile, Rapido e Preciso

- **Siringa pronta all'uso** con puntali sottili pre-inclinati
- **Facile inserzione** di Racegel nel solco essendo liquido quando lo si posiziona
- **Racegel non cola e non gocciola** durante il posizionamento
- Colorazione arancione per **visualizzare facilmente il gel**



Uso facoltativo di filo retrattore  
in caso di preparazione  
subgingivale profonda

## Risciacquo Veloce e Sicuro

- Viscosità termogelificabile **reversibile**:
  - La viscosità di Racegel diminuisce con il risciacquo a contatto con l'acqua fredda
  - Assenza di sanguinamento durante il risciacquo



## Spostamento Minimo ma Impronte di Qualità Superiore



Spostamento gengivale minimo ma adeguato per una definizione precisa dei margini cervicali per delle impronte di qualità superiore.

# Racegel

il modo efficace per gestire tutte le vostre preparazioni gengivali e prese di impronta.

Racegel vs. Paste di Retrazione	Racegel vs. Soluzioni Emostatiche	Racegel vs. Fili di Retrazione
Non richiede soluzioni emostatiche addizionali	Non cola e non gocciola rimanendo in posizione	Facile e veloce da posizionare
Assicura impronte di qualità superiore con uno spostamento gengivale minimo	Non causa nessuna pigmentazione gengivale	Non causa sanguinamento durante il risciacquo
Dotazione dedicata non richiesta	Assicura delle impronte di qualità superiore con uno spostamento gengivale minimo	Assicura delle impronte di qualità superiore con uno spostamento gengivale minimo
Gusto al lampone gradevole per il paziente	Offre un sistema pronto all'uso efficace	Mantiene l'integrità dell'attacco epiteliale



## Presentazione del Prodotto

### Disponibile in:

- Confezione da 3 siringhe e 30 puntali applicatori



The Dental Pharmaceutical Company

INNOVATIVE, SAFE AND EFFECTIVE SOLUTIONS FOR DENTISTRY WORLDWIDE